


自動電子血圧計 上腕式


MXHT-BP200

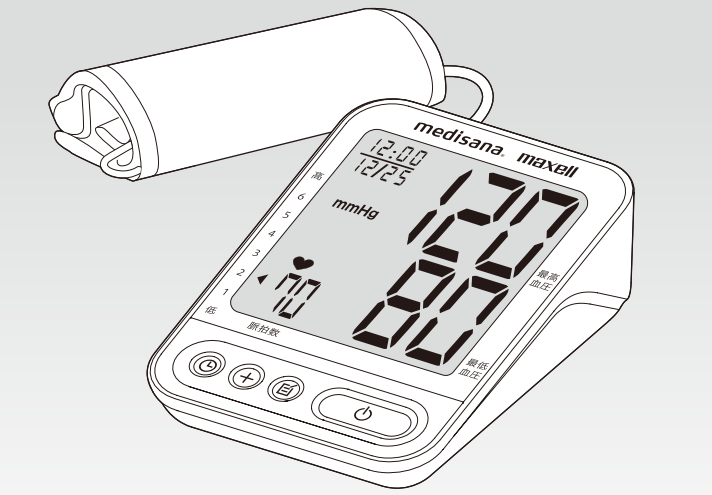

取扱説明書

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は、ご家庭での健康管理のための血圧測定を目的としています。上腕に装着するカフにより、成人の最高／最低血圧と脈拍を測定する自動電子血圧計です。ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。

3.各部のなまえ

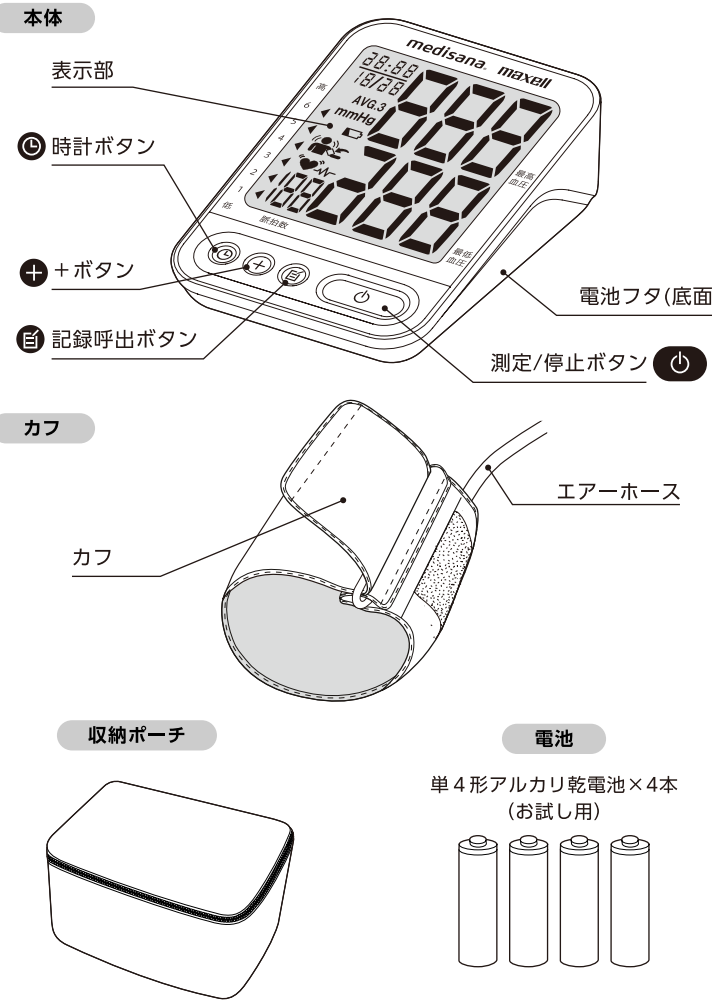

1.はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- ・この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ・この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。
- ・イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

2.安全上のご注意 必ずお読みください

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。


表示の説明

表示	表示の意味
警告	人が死亡または重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。
注意	人が負傷または物が破損する可能性がある内容を示します。

図記号の説明

図記号	図記号の意味
	気をつけて頂く必要がある内容を示します。
	してはいけない内容を示します。
	必ず実行しなければならない内容を示します。

4.表示部のなまえ

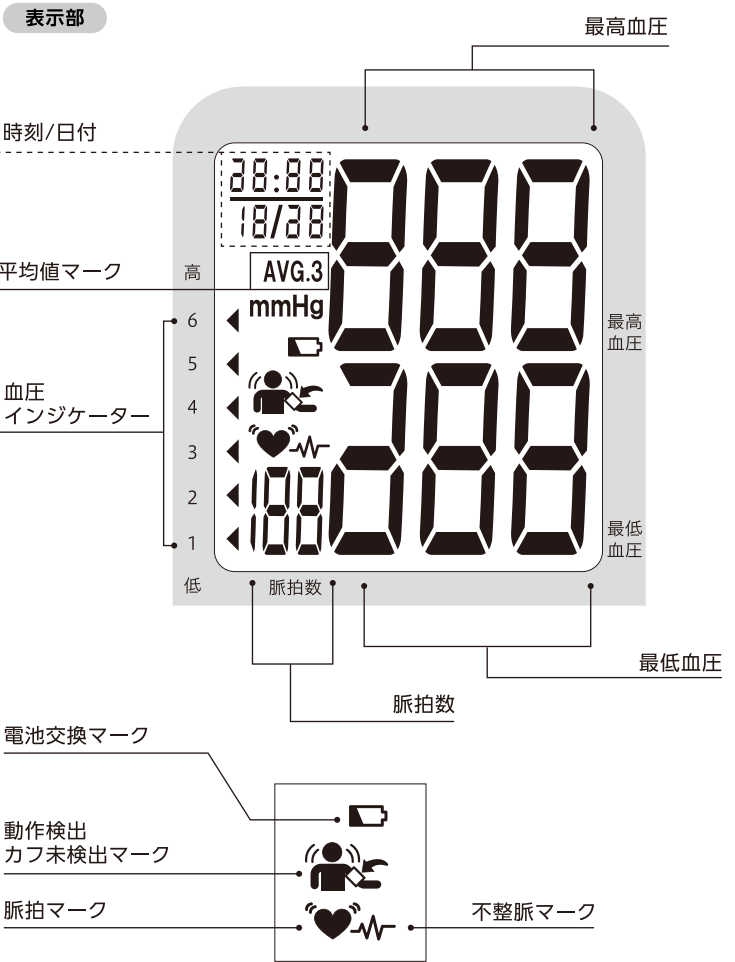

警告

- けがや治療中の腕で測定しない。
症状悪化の原因になります。
- 可燃性ガスや高濃度酸素環境下などで使わない。
火災や爆発の原因になります。
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
乳幼児が電池などを飲み込み、窒息やけがの原因になります。

注意


- 分解や修理、改造をしない。また、強い電磁波のあるところで使用しない。
測定値に誤差が生じたり、故障の原因になります。
- 測定結果の自己診断をしない。治療は医師の指導に従う。
自己診断は、症状悪化の原因になります。
- 医療機関や公共の場所などにおいて不特定多数で使わない。
症状の悪化やけが、誤動作の原因になります。
- 加熱したり、火の中に入れたりしない。
破裂などにより、けがの原因になります。
- 踏んだり、強い衝撃や振動を与えたり、落としたりしない。
事故や故障の原因になります。
- 乳幼児など自分で意思表示できない人に使わない。また、お子様へのご使用はさける。
症状の悪化やけが、誤動作の原因になります。
- 電池の⊕⊖極を正しく入れる。
発熱や液もれ、破裂などの原因になります。
- 長期間使用しないときは、電池をはずす。
液もれ、故障などの原因になります。

5.電池交換と時計の合わせかた

- ① 本体底面の電池フタをはずして、⊕⊖極性に注意して新しい電池を挿入し、フタを閉めます。

- ※表示部に「」が表示されたら新品の電池に交換してください。
- ※古い電池はセロハンテープなどで電極を絶縁し、お住まいの市区町村の回収方法にしたがって廃棄してください。
- ※逆装填しないでください。
- ※新旧、異種銘柄の電池を混用しないでください。

- ② 時計ボタン を押し、時計設定モードにします。
+ボタン を押して変更(長押しで早送り)、
時計ボタン を押して次の項目に進みます。

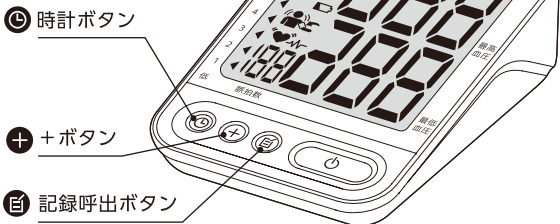

- ③ 「西暦年」を合わせる
+ボタン を押して「年」を変更(2021-2035)
時計ボタン を押して決定し、次の項目へ

- ④ 日付(月)を合わせる
+ボタン を押して「月」を変更
時計ボタン を押して決定し、次の項目へ

- ⑤ 日付(日)を合わせる
+ボタン を押して「日」を変更
時計ボタン を押して決定し、次の項目へ

- ⑥ 時刻(時)を合わせる
+ボタン を押して「時」を変更(24時間表示)
時計ボタン を押して決定し、次の項目へ

- ⑦ 時刻(分)を合わせる
+ボタン を押して「分」を変更
時計ボタン を押して決定し、設定終了

※途中で設定を終了したいときは を押してください。
※ 1 分間何も操作しないと設定を終了し、電源OFFします。

6.測定するタイミングについて

血圧は1日のうちでも変化しますので、起床時や就寝前の決まった時間に測定することが推奨されます。
起床後は1時間以内で、排尿後、朝食・服薬前に5分以上安静にしてから測定してください。
就寝前も5分以上安静にしてから測定してください。

7.血圧の測りかた

① 使用者番号を設定する。


使用者番号を切り替えることで、
2人分の測定結果を別々に記録できます。

+ボタン **+** を押して使用者番号「no1」
または使用者番号「no2」を選択します。




② カフを本体に接続する。

カフのエアースを本体側面の
コネクターに接続します。

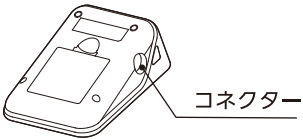

③カフを上腕に巻く。

エアースの反対側から
カフに腕を通し、面ファスナーで留めます。
(肘の折り曲げ位置から約2～3cm上)

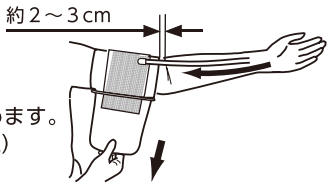


④正しい姿勢を確認する。

座った状態で測定を行ってください。

腕をリラックスさせ、
肘をテーブルの上に置きます。
カフは心臓の高さに合わせます。

※測定中は、動いたり会話したりしないでください。
測定値が変わる可能性があります。

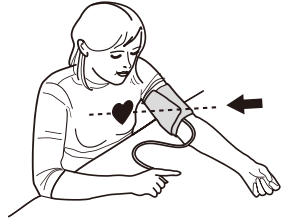


9.血圧インジケーター

測定結果から血圧インジケーターでレベル表示します。

最高血圧 mmHg	最低血圧 mmHg	分類	インジケーター レベル
≥180	≥110	重度高血圧	6
160-179	100-109	中等度高血圧	5
140-159	90-99	軽度高血圧	4
130-139	85-89	高値血圧	3
120-129	80-84	正常血圧	2
<120	<80	最適血圧	1

10.測定記録を消去する

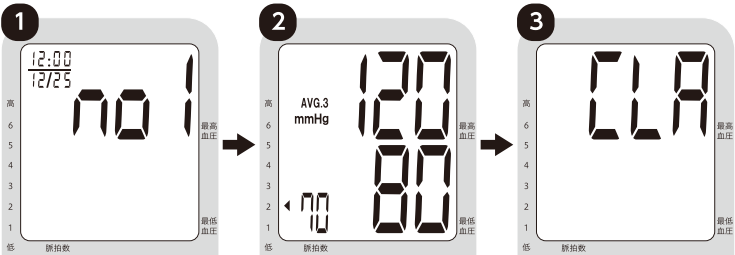


+ボタン **+** を押して
「no1」または「no2」
を選択

記録呼出ボタン **⏮** を
押して直近の3回分の
平均値表示

時計ボタン **⌚** と
+ボタン **+** を同時に
押すと「CLA」と表示され、
選択した使用者番号の
測定記録が消去される

7.血圧の測りかた

⑤血圧を測る。 測定結果は、測定前に設定した使用者番号に記録されます。 測定/停止ボタン **⏻** を押して、測定を開始します。

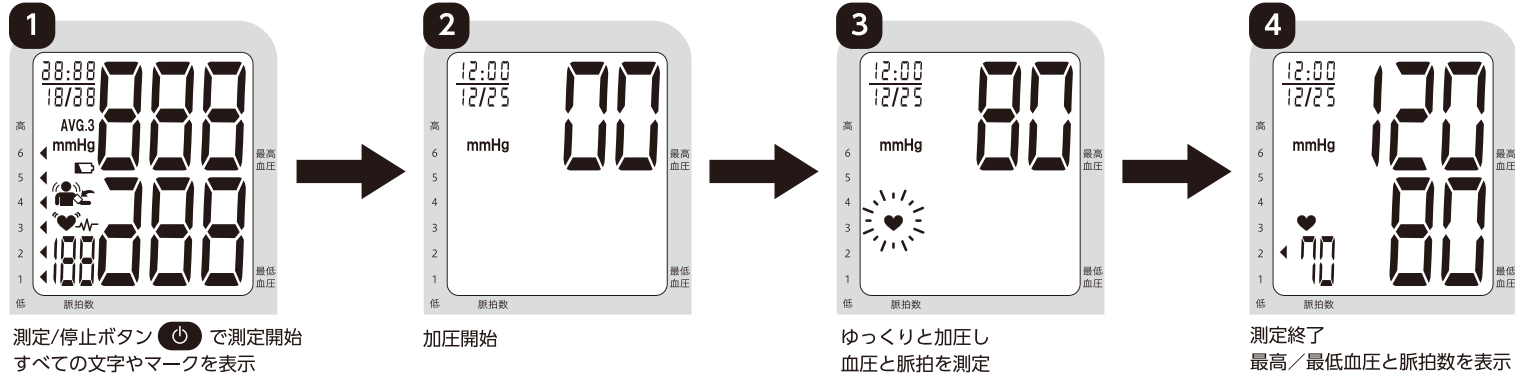

測定/停止ボタン **⏻** で測定開始
すべての文字やマークを表示

加圧開始


ゆっくりと加圧し
血圧と脈拍を測定

測定終了
最高/最低血圧と脈拍数を表示

※途中で測定を終了したいときは、測定/停止ボタン **⏻** を押してください。
※測定終了後1分間何も操作しないと終了し、電源OFFになります。

8.測定記録を見る

本製品は、使用者番号ごとに最大120回分の測定結果を記録できます。

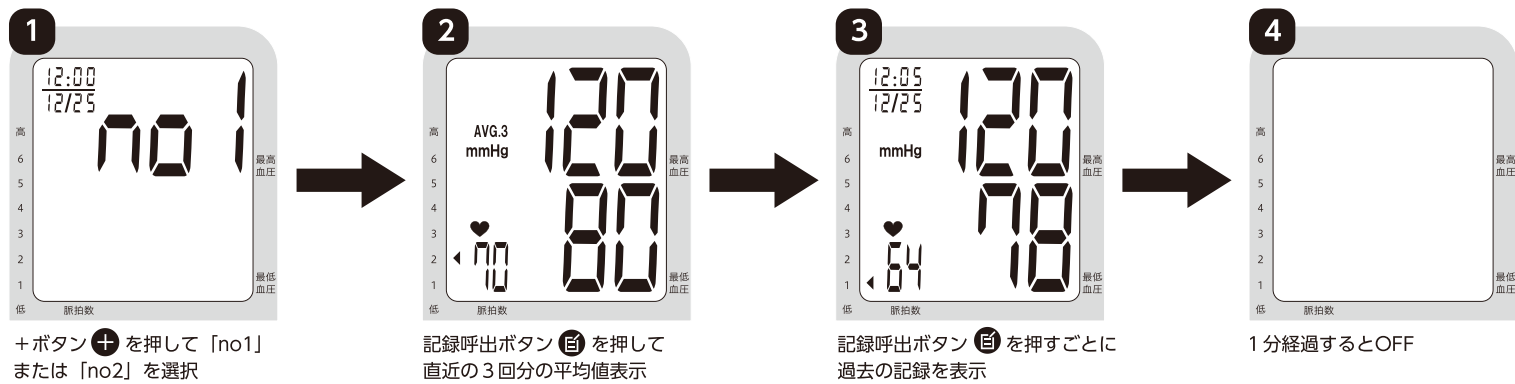

+ボタン **+** を押して「no1」
または「no2」を選択

記録呼出ボタン **⏮** を押して
直近の3回分の平均値表示

記録呼出ボタン **⏮** を押すごとに
過去の記録を表示

1分経過するとOFF

※記録数が120を超えたときは、古い記録から順に消去されます。
※途中で表示を終了したいときは 測定/停止ボタン **⏻** を押してください。

13.廃棄のしかた

お住まいの地域によって回収品目、回収方法が異なるため、ご使用済み製品や電池の廃棄に関しては、お住まいの市区町村の回収方法にしたがってください。

14.故障かな?と思ったら

本体が正常に動かないときは以下のご確認をお願いします。もし正常に戻らない場合はお買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

症状	原因	対処の方法
「EE」表示	血圧が高すぎる・低すぎる 脈拍が検出できない	電源を一旦切り、カフを正しく巻いて再測定する
「E1」表示	加圧異常 ホースが接続されていない	ホースの接続を確認して再測定する
「E2」表示	加圧が300mmHgを超えた	電源を一旦切り、再測定する
「E3」表示	測定が失敗した 動いた・会話した	カフを正しく巻いて、再測定する
「  」表示	動いた・会話した カフが正しく巻かれていない	カフを正しく巻いて、再測定する
「  」表示	動いた・会話した カフがきつすぎる・緩すぎる	カフを正しく巻いて、再測定する
「  」表示	脈拍検出が不規則	「正しく測定できないとき」を確認して再測定する 常に出る場合は、医師に相談する
電源が入らない	電池の極性を間違えた	電池を正しく挿入する
	電池が入っていない	
	電池の接触不良	
	電池が消耗した	4本同時に新しい電池に交換する
「  」表示	電池が消耗した	
電源が切れない	—	1分後に自動で電源が切れます

15.仕様

医療機器認証番号	：307AKBZX00010000
名称	：自動電子血圧計 上腕式 MXHT-BP200
表示方式	：デジタル表示方式
測定方式	：オシロメトリック法
血圧測定範囲	：40～280 mmHg
脈拍測定範囲	：40～199 拍/分
測定精度	：血圧：±3mmHg 以内 脈拍数：読み取り値 ±5% 以内
加圧方式	：ポンプによる自動加圧方式
減圧方式	：自動排気方式
電源	：単4形アルカリ乾電池 4本 (DC6V)
付加機能	：メモリー機能(120回×2人分) 自動電源OFF(血圧測定時 約1分)
使用環境条件	：5～40℃ 15～93%RH
保管環境条件	：-25～70℃ ≤93%RH
電撃保護分類	：内部電源機器・BF形装着部
耐用年数	：約5年
外形寸法	：約137×98.5×52mm(カフ含まず)
対象上腕周	：23～43cm(成人)
本体質量	：約260g(電池含まず)
同梱品	：カフ、収納ポーチ、お試し用電池 4本、取扱説明書(保証書付)
製造販売元	：(株) NAIPO CARE JAPAN

16.保証とアフターサービス

●保証書

保証書はよくお読みの上、購入証明書(納品書・レシートなど)とともに大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

●本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社電響社 マクセル製品 お客様ご相談センター TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル) FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル) https://www.maxell.co.jp マクセルお問い合わせ 検索	※記載されている名称、ロゴ、サービス マークは、マクセルまたは他社の登録 商標もしくは商標です。
---	--